



ergo vac compact

Aanvulling op de gebruiksaanwij-
zing ergo vac compact

Artikelnr. 360901

Pagina 33

8.1 Mogelijke fouten

Elektronische fouten

Klantinformatie

i

Lees voor gebruik van het apparaat de volgende aanvulling op de gebruiksaanwijzing.

In het ergste geval kan de functie batterijbeschermingsmodus ervoor zorgen dat het systeem wordt geblokkeerd. Dit komt tot uiting doordat het systeem na het activeren van de batterijbeschermingsmodus niet meer in de actieve stand kan worden gezet, zelfs niet na het opladen met de netvoeding.

Deze toestand kan met de volgende stappen worden gereset:

1. Sluit het apparaat aan op de originele netvoeding en zorg ervoor dat het apparaat minimaal 30 minuten is opgeladen.
2. Controleer de status van het apparaat. Druk op de aan/uit-knop. Batterijbeveiligingsmodus geactiveerd -> linker LED knippert. Het apparaat kan ondanks de netvoeding niet worden gestart.



3. Druk 3 keer kort achter elkaar op de aan/uit-knop.



4. Controleer de functies van het zuigsysteem.

i

Als het systeem na het resetten nog steeds niet kan worden gestart, is er waarschijnlijk sprake van een storing in het zuigsysteem die moet worden gerepareerd. Neem het systeem in dat geval buiten gebruik en stuur het ter controle naar de mbnet-reparatieservice.

ergo vac compact is voorzien van het keurmerk dat aantoont dat het voldoet aan de toepasselijke fundamentele veiligheids- en prestatie-eisen overeenkomstig bijlage I van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (MDR). De eisen hebben betrekking op patiënten, gebruikers en derden die in contact komen met dit apparaat tijdens het beoogde gebruik.

Stand: 10/2022

mbnet Engineering GmbH
Kirschauer Strasse 37a
OT Callenberg
D-02681 Schirgiswalde-Kirschau

Telefon +49 (0)3592 34 83 0
E-Mail info@mbnet.de
Internet www.mbnet.de