



## ergo vac compact

Integrazione alle istruzioni per  
l'uso ergo vac compact

Codice articolo 360901

Pagina 33

8.1 Possibili errori

Errori elettronici

## Informazioni per i clienti

### i

### Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere il seguente supplemento alle istruzioni per l'uso.

Nella funzione Modalità di protezione della batteria, nel peggiore dei casi può verificarsi il blocco dell'impianto. Ciò si manifesta con l'impossibilità di ripristinare lo stato attivo dell'impianto dopo l'attivazione della modalità di protezione della batteria, anche dopo averlo ricaricato con l'alimentatore.

Questo stato può essere ripristinato seguendo questi passaggi:

1. Collegare l'impianto all'alimentatore originale e assicurarsi che sia stato caricato per almeno 30 minuti.
2. Controllare lo stato dell'impianto. Premere il tasto di accensione/spegnimento. Modalità di protezione della batteria attivata -> il LED sinistro lampeggia. L'impianto non si avvia nonostante sia collegato alla rete.



3. Premere il tasto di accensione/spegnimento 3 volte in rapida successione.



4. Controllare il funzionamento dell'impianto di aspirazione.

**i**

Se dopo il reset l'impianto continua a non avviarsi, è probabile che si tratti di un guasto dell'impianto di aspirazione che richiede una riparazione. In tal caso, mettere fuori servizio l'impianto e inviarlo al servizio di riparazione mbnet per un controllo.

ergo vac compact è contrassegnato dal marchio che attesta la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e prestazione applicabili ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR). I requisiti si riferiscono a pazienti, utenti e terzi che entrano in contatto con questo dispositivo nel corso del suo utilizzo previsto.

Aggiornato al: 10/2022

**mbnet Engineering GmbH**  
Kirschauer Strasse 37a  
OT Callenberg  
D-02681 Schirgiswalde-Kirschau

**Telefon** +49 (0)3592 34 83 0

**E-Mail** [info@mbnet.de](mailto:info@mbnet.de)

**Internet** [www.mbnet.de](http://www.mbnet.de)